GÉZATONE



МАСКА ЗАЩИТНАЯ ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ БЫТОВЫХ ЦЕЛЕЙ







НАЗНАЧЕНИЕ

МАСКА КN95 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ СЕЗОННЫХ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЕМ, ПРИ КОНТАКТЕ И РАБОТЕ С АЭРОЗОЛЯМИ, А ТАКЖЕ ПРИ УБОРКЕ И ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ТРЕБУЮЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ БАРЬЕРНОЙ ЗАЩИТЫ.



РЕМОНТ ИЛИ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА



СЕЗОННЫЕ ВИРУСНЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ



РАБОТА ИЛИ КОНТАКТ С АЭРОЗОЛЯМИ



НЕБЛАГОПРИЯТНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА



ЗАЩИТА ОТ ВДЫХАНИЯ СПОР ПЛЕСЕНИ, ПЫЛЬЦЫ



ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Артикул 706203

МАСКА КN95 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ, ОФИСАХ, ПРЕДПРИЯТИЯХ, ТРАНСПОРТЕ, В МЕСТАХ СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ И ДРУГИХ ПРОСТРАНСТВАХ.

- НОСОВОЙ ФИКСАТОР И ЭЛАСТИЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЮТ КОМФОРТНОЕ НОШЕНИЕ И ПОВЫШАЮТ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗА СЧЕТ ПЛОТНОГО ПРИЛЕГАНИЯ К ЛИЦУ.
- БЛАГОДАРЯ УНИВЕРСАЛЬНЫМ РАЗМЕРАМ, ПОДХОДИТ КО ВСЕМ РАЗМЕРАМ И ТИПАМ ЛИЦА.
- ВНУТРЕННИЙ ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ СЛОЙ НЕ РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ И НЕ ОСТАВЛЯЕТ СЛЕДОВ НА ЛИЦЕ



ЗАДЕРЖИВАЕТ **95%** ВРЕДНЫХ ЧАСТИЦ



НОСОВОЙ ФИКСАТОР



5 ЗАЩИТНЫХ СЛОЁВ



НЕ ЗАТРУДНЯЕТ ДЫХАНИЕ



ЭЛАСТИЧНЫЕ ЗАУШНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ФОРМА ДЛЯ ЛЮБОГО ТИПА ЛИЦА



МНОГОРАЗОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ




КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



5 СЛОЁВ ЗАЩИТЫ

МАСКА КN95 ДЛЯ МНОГОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, ЗАДЕРЖИВАЕТ 95% ТВЕРДЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ. ЧИСТОТУ ВДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА ОБЕСПЕЧИВАЮТ 5 СЛОЕВ ИЗ ХЛОПКА, НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА И ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ФИЛЬТРУЮЩЕЙ ТКАНИ MELTBLOWN.

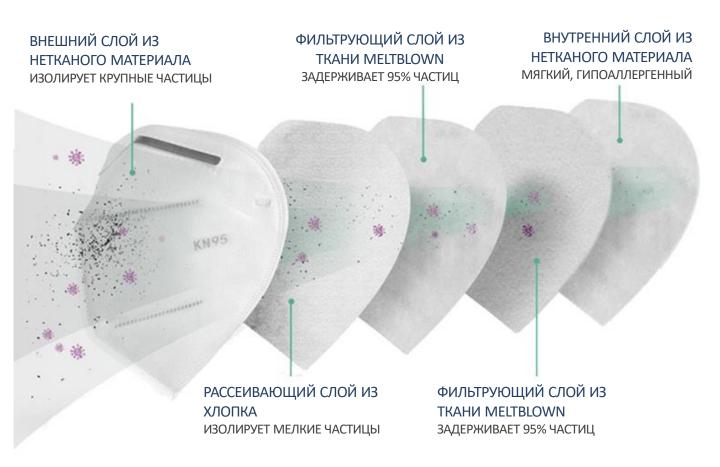



ПОЛНОЕ ПРИЛЕГАНИЕ К ЛИЦУ



ЗАДЕРЖИВАЕТ ЧАСТИЦЫ РАЗМЕРОМ ДО **0,03** МИКРОН



ФИЛЬТРУЮЩАЯ ТКАНЬ MELTBLOWN



ОБЛАДАЕТ ВЛАГОСТОЙКОСТЬЮ





КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

РУКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧИСТО ВЫМЫТЫ С МЫЛОМ ИЛИ ОБРАБОТАНЫ САНИТАЙЗЕРОМ ПЕРЕД НАДЕВАНИЕМ МАСКИ.

НЕ ТРОГАЙТЕ РУКАМИ ВНУТРЕННЮЮ ПОВЕРХНОСТЬ. ДЕРЖИТЕ МАСКУ ЗА РЕЗИНКИ. ЕСЛИ МАСКА ПРОМОКЛА, ДЕФОРМИРОВАЛАСЬ ИЛИ ИСПАЧКАЛАСЬ, А ТАКЖЕ ЕСЛИ СТАЛО ТРУДНО ДЫШАТЬ, МАСКУ НУЖНО СРАЗУ ЗАМЕНИТЬ.



ИЗВЛЕКИТЕ МАСКУ ИЗ УПАКОВКИ, РАЗВЕРНИТЕ. НЕ КАСАЙТЕСЬ РУКАМИ ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ



ПРИЛОЖИТЕ МАСКУ К ЛИЦУ



ЗАКРЕПИТЕ ЭЛАСТИЧНЫЕ ПЕТЛИ - ФИКСАТОРЫ ЗА УШАМИ



ПЛОТНО ЗАКРЕПИТЕ ФИКСАТОР НА ПЕРЕНОСИЦЕ



ПРОВЕРЬТЕ ПЛОТНОСТЬ ПРИЛЕГАНИЯ МАСКИ К ЛИЦУ



ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ ПУТЁМ, ЯВЛЯЕТСЯ КОМБИНАЦИЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАСКИ С СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ.



ВАЖНО







- РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОГО НОШЕНИЯ МАСКИ 2 3 ЧАСА. ПОСЛЕ ЧЕГО МАСКУ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАМЕНИТЬ.
- ПРИ ПОВТОРНОМ НАДЕВАНИИ МАСКИ НУЖНО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОСМОТРЕТЬ ЕЕ И УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО МАСКА НЕ ПОВРЕЖДЕНА И НЕ ИСПАЧКАНА.
- ЕСЛИ МАСКА СТАЛА ВЛАЖНОЙ ОТ ДЫХАНИЯ, ЕЕ МОЖНО СУШИТЬ В РАСПРАВЛЕННОМ ВИДЕ НА ЧИСТОЙ САЛФЕТКЕ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ ПОМЕЩЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ 30-60 МИНУТ.
- НЕ ТРОГАЙТЕ МАСКУ ГРЯЗНЫМИ РУКАМИ
- ДЕЗИНФЕКЦИЯ РУК ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ДО И ПОСЛЕ ЛЮБОГО КОНТАКТА С МАСКОЙ.
- МАСКУ ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПОМЕСТИТЕ В ЧИСТЫЙ КОНТЕЙНЕР С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ (БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ), ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЛОЖИВ МАСКУ ПО ЛИНИЯМ СГИБА ТАК, ЧТОБЫ ВНУТРЕННИЕ ЧАСТИ МАСКИ ПЛОТНО ПРИЛЕГАЛИ ДРУГ К ДРУГУ. ПОСЛЕ ЭТОГО ТЩАТЕЛЬНО ОБРАБОТАЙТЕ РУКИ.
- МНОГОКРАТНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО СУХУЮ,
 ЧИСТУЮ МАСКУ, ОБРАБОТАННУЮ ГОРЯЧИМ ПАРОМ ИЛИ
 УЛЬТРАФИОЛЕТОМ.
- МАСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НОСИТЬ ДЕТЯМ И ЛЮДЯМ, КОТОРЫЕ ИСПЫТЫВАЮТ ТРУДНОСТИ С ДЫХАНИЕМ







GÉZATONE





Москва 8 (495) 120-10-80 регионы РФ: 8(800) 500-95-94 (звонок бесплатный)



http://www.sozv.ru/



http://instagram.com/sozvezdiekrasoti



http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty



https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti



http://vk.com/sozvezdiekrasoti